

# CORE-FLO DC Lite

---

CORE-FLO DC Lite є рентгеноконтрастним текучим матеріалом подвійного затвердіння, що містить іони фтору, спеціально створеним для цементування штифтів і створення надбудови (культі) в одночасній простій аплікації.

CORE-FLO DC Lite також є і матеріалом для заміщення дентину.

Випускається в подвійному автозмішувальному шприці, в **Натуральному/A1** та **Опаковому** відтінках. Призначений для використання з адгезивами, сумісними з матеріалами подвійного затвердіння (як адгезиви Біско.)

## Показання до застосування:

- Матеріал для створення кукси
- Цементування штифтів
- Матеріал для заміщення дентину

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

### Процедури змішування культевого матеріалу:

1. Видаліть кришку шприца або змішувального кінчика подвійного шприца.
2. Видавіть невелику кількість матеріалу на змішувальну підкладку, щоб усунути порожнечі в кожній із камер подвійного шприца.
3. Приєднайте змішувальний кінчик подвійного шприца, зіставивши направляючий ключ і паз. Під'єднайте змішувальний тип до подвійного шприца і поверніть коричневий з'єднувальний механізм за годинниковою стрілкою.
4. При натисканні поршня відбуватиметься змішування і видавлювання CORE-FLO DC Lite.

### 1. Core build-up, використовуючи core-flo dc

1. Ізолюйте зуб гумовою заслінкою.
2. Нанесіть адгезив відповідно до вказівок виробника; ми рекомендуємо скористатися будь-яким адгезивом BISCO.
3. а.) Якщо ви користуєтесь матричною пластинкою, розташуйте її навколо препарованого зуба. Помістіть внутрішньоротовий кінчик безпосередньо на препаровку і CORE-FLO DC Lite. Світло-затвердуйте 40 секунд.  
б.) Якщо ви використовуєте куксову форму, помістіть змішувальний кінчик безпосередньо у форму і видавіть CORE-FLO DC Lite. Помістіть заповнену культеву форму на препарований зуб і утримуйте її, світло-полімеризуйте 40 сек.
4. Обробіть куксу звичайним способом, користуючись алмазними і карбідними борами.

### 2. Цементация штифта і створення куксової надбудови, використовуючи Core build-up, застосувавши core-flo dc lite

1. Ізолюйте і препаруйте зуб відповідно до вказівок виробника штифта.
2. Нанесіть адгезив відповідно до інструкцій виробника. Ми рекомендуємо застосувати будь-якого адгезиву BISCO. До світло-полімеризації промокніть канал насухо паперовими турундами поки вони не виходять із каналу сухими, потім м'яко просушіть канал повітряним струменем, щоб випарувати розчинник.

**ПРИМІТКА:** Використання паперової турунди є важливим етапом для видалення скупчень адгезиву, щоб не було перешкод для повного встановлення штифта.

3. Нанесіть шар адгезиву на поверхню штифта відповідно до вказівок виробника. Це підвищить змочуваність поверхні штифта.
4. Користуючись змішувальним кінчиком для кореневих каналів, введіть CORE-FLO DC Lite у канал. Почніть з апікального відділу каналу і повільно виводьте кінчик, залишаючи кінчик у цементі, щоб зменшити повітряні пори.

5. Нанесіть CORE-FLO DC Lite на апікальну ділянку штифта. М'яко встановіть штифт у канал і підтримуйте тиск 20-30 сек. поки штифт не встановиться на місце.
6. Продовжуйте видавлювати CORE-FLO DC Lite навколо штифта і надбудуйте куксу бажаної висоти і форми.
7. Видаліть надлишки матеріалу і світло-затверджуйте 40 сек., розмістивши кінчик світловода якомога ближче до штифта і надбудови.
8. Закінчіть і обробіть куксу, у звичайній манері, алмазними і карбідними борами.

### **3. МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ДЕНТИНУ**

1. Ізолюйте зуб і препаруйте в консервативній манері. Сполосніть і підсушіть.
2. Нанесіть адгезив відповідно до інструкцій виробника; ми рекомендуємо будь-який адгезив від BISCO.
3. Видавіть CORE-FLO DC Lite тільки до рівня дентино-емалевої межі.
4. Світло-затвердіть CORE-FLO DC Lite 10 сек. Продовжуйте щільно пакувати світло-затверджуваний композит, поступово, до заповнення препарування. Світло-затвердіть відповідно до інструкцій виробника.
5. Повірте оклюзію і продовжуйте з обробкою та поліруванням.

#### **Технічна інформація:**

- Робочий час: Мінімум 1 хвилина
- Час схоплювання: Максимум 7 хвилин
- Робочий час і час схоплювання можуть варіювати залежно від умов зберігання, температури, вологості тощо.

#### **Важливо:**

- Забруднення слиною, кров'ю або водою під час цих процедур слід уникати. Забруднення під час використання зубних адгезивів порушуватиме дентинний бондинг і може сприяти зменшенню довговічності реставрацій.
- У всіх випадках, де забруднення можливе, рекомендується використовувати кофердам.
- Уникати контакту зі шкірою. Неполімеризована (метил)акрилатна смола може викликати подразнення у людей із чутливою шкірою. У разі контакту, промийте шкіру водою з милом.
- Ізолюйте куксу перед зняттям зліпка для виготовлення тимчасової коронки мостоподібного протеза (можливо, що достатньо буде ретельно змочити куксу), для того, щоб попередити бондинг із цими матеріалами.
- Якщо матеріал зберігався в холодильнику, він повинен досягти кімнатної температури до його використання.

---

**ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігайте при кімнатній температурі (20-25°C).

**ТОВ «ДЕНКО ПРО»**  
(067)-506-51-65  
[www.denco.com.ua](http://www.denco.com.ua)