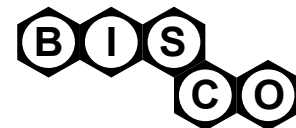


# Aqua-Prep F™

фторированный десенсилайзер для повторного увлажнения



**AQUA-PREP F** - водный раствор фтора и гидроксиэтила метакрилата (HEMA), является идеальным препаратом для повторного увлажнения, который следует применять перед нанесением гидрофильных адгезивных смол.

AQUA-PREP F дает ответ на часто задаваемый вопрос: «Насколько влажное влажно?»

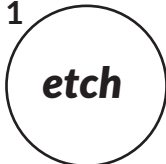

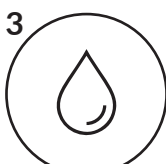

Применение AQUA-PREP F обеспечивает идеальное для бондинга количество влаги.

Недавние университетские исследования продемонстрировали, что AQUA-PREP F создает зону подавления кариеса в прилегающих структурах зубов.

AQUA-PREP F наносится на препаровку полости после кислотного травления и слегка просушивается, чтобы обеспечить оптимальный уровень влаги, остающейся в полости.

**AQUA-PREP F** может уменьшить послеоперационную чувствительность, возникающую вследствие чрезмерного высушивания или неправильного увлажнения дентина.

## Инструкции по применению:

-  Протравите дентин и эмаль в течение 15 с фосфорной 32% кислотой UNI-ETCH с БАС. Тщательно промывайте около 5 с.
-  Высушивайте воздухом 2-4 с. Перед нанесением AQUA-PREP F идеальной является сухая, но не пересушенная, поверхность. Дентин должен выглядеть тусклым, а протравленная эмаль - матовой.
-  Отмерьте в смеситель 2 капли AQUA-PREP F. Кисточкой нанесите на дентинную и эмалевую поверхности. Не используйте ватный тампон. AQUA-PREP F должен впитываться 20 с.
-  Слегка подсушите AQUA-PREP F воздухом, чтобы удалить излишки препарата. Избегайте образования лужиц, в особенности, в углах препаровки. В результате, поверхность должна выглядеть глянцевой.
5. Следуя инструкциям производителя, нанесите адгезивные смолы.

## Предосторожности:


- Неполимеризованные смолы могут вызвать раздражение кожи. В случае попадания материала на кожу, тщательно промойте место контакта мылом и водой.

**ХРАНЕНИЕ:** Храните при комнатной температуре 20°C.

## Каталожный номер:

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| • Aqua-Prep F (6ml)  | B-2822P |
| • Aqua-Prep F (30ml) | B-2824P |
| • Aqua-Prep F (2ml)  | B-2821S |

 BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.  
 1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

 ООО «Денко-Украина»  
бул.Т.Шевченко,1 оф.8  
Киев, 01004, Украина  
 (067) 506-51-65  
[www.denco.com.ua](http://www.denco.com.ua)