


CHOICE 2

цемент для фиксации виниров

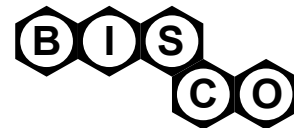

CHOICE 2 - светоотверждаемый цемент для фиксации виниров, обладающий высокой стабильностью цвета, высокой прочностью на сжатие, созданный специально для фиксации керамических и композитных виниров.

CHOICE 2 TRY-IN PASTE - растворимые пробные пасты, используются для точного подбора цвета цемента, который будет использован для фиксации винира.

Показания к применению:

- Цементировка виниров из фарфора, дисиликата лития или композитных облицовок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

БОНДИНГ ВИНИРОВ:

Подготовка реставрации и примерка:

А. ВИНИРЫ ИЗ ФАРФОРА ИЛИ ДИСИЛИКАТА ЛИТИЯ

1. Убедитесь, что фарфоровые виниры были протравлены должным образом или протравите их, в соответствии с инструкциями производителя, плавиковой кислотой (как, например, 9.5% PORCELAIN ETCHANT).
2. Нанесите кисточкой 1-2 слоя силана (при использовании Porcelain Primer BIS-SILANE, смешайте его две части в соотношении А и В 1:1) внутри виниров. Выждите 30 секунд и просушите воздухом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхность фарфора, обработанная Porcelain Primer будет выглядеть также, как и до нанесения силана.

3. Очистьте препаровку зуба водой с пемзой, сполосните и подсушите.
4. Примерьте на зубе, покрытую силаном, облицовку для определения оптимального прилегания. Нанесите на винир примерочную пасту необходимого оттенка из CHOICE 2 TRY-IN PASTE и аккуратно посадите на зуб.

ПРИМЕЧАНИЕ: TRY-IN PASTE Примерочная паста не отвердевает и будет соответствовать оттенку укрепляющего цемента.

5. После того, как желаемый оттенок CHOICE 2 определен удалите винир и сполосните его и зуб водой. Винир следует тщательно промыть водой или, в идеале, очистить в дистиллированной воде в ультразвуковом очистительном приборе или в спирте (этанол/изопропил) в течение 2-3 минут, а затем просушить.

Б. КОМПОЗИТНЫЕ ВИНИРЫ

1. Очистьте препаровку зуба смесью воды и пемзы, сполосните и подсушите.
2. Примерьте, покрытый силаном, винир на зубе для определения оптимального прилегания. Нанесите необходимый оттенок примерочной пасты из CHOICE 2 TRY-IN PASTE на винир и аккуратно посадите на зуб.

ПРИМЕЧАНИЕ:

TRY-IN PASTE Примерочная паста не отвердевает и будет соответствовать укрепляющему цементу.

3. После того, как желаемый оттенок CHOICE 2 определен, удалите винир и сполосните его и зуб водой. Винир следует тщательно промыть водой или, в идеале, очистить в дистиллированной воде в ультразвуковом очистительном приборе или в спирте (этанол/изопропил) в течение 2-3 минут, а затем просушить.
4. Слегка пропескоструйте внутреннюю поверхность винира в течении 1-2 секунд. Сполосните и подсушите.

ПОДГОТОВКА ЗУБА:

1. Очистьте препарированный зуб смесью воды и пемзы. Промойте и просушите.
2. Изолируйте препарированные зубы (в идеале два соседних одновременно) прозрачной матричной полоской или тонкой межзубной металлической прокладкой (shims).
3. Протравите эмаль и дентин, пользуясь UNI-ETCH (32% фосфорной кислоты) в течении 15 секунд.

Тщательно промойте и удалите излишки воды, но не пересушивайте; препаровка должна выглядеть явно влажной.

4. Нанесите адгезив в соответствии с инструкциями производителя:

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ALL-BOND 3:

Смешайте Parts A и B в соотношении 1:1 и нанесите 1-2 последовательных слоя на препаровку. Легко, но тщательно просушите воздушной струей, чтобы удалить растворитель. Поверхность должна выглядеть блестящей; в противном случае нанесите дополнительный слой ALL-BOND 3 и просушите воздухом. Свето- отверждайте 10 секунд.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ALL-BOND UNIVERSAL:

Нанесите два отдельных слоя ALL-BOND UNIVERSAL, протирая препаровку микрокисточкой в течении 10-15 секунд на слой. Не свето-полимеризуйте между слоями. Испарите растворитель, тщательно просушив воздушным шприцем в течении минимум 10 секунд; после чего не должно наблюдаться видимого движения адгезива. Поверхность должна иметь однородную блестящую поверхность; в противном случае, нанесите дополнительный слой ALL-BOND UNIVERSAL и просушите воздушной струей. Свето- отверждайте в течении 10 секунд.

5. Удалите металлические прокладки или прозрачные полоски между зубами.

ЦЕМЕНТИРОВКА:

1. Нанесите очень тонкий слой смолы, свободной от HEMA, как PORCELAIN BONDING RESIN* на внутреннюю поверхность винира и НЕ СВЕТО-ПОЛИМЕРИЗУЙТЕ.
2. Нанесите обильное количество избранного оттенка CHOICE 2 Veneer Cement на внутреннюю поверхность винира.
3. Парно аккуратно поместите каждый винир по отдельности и мягко направьте каждый винир отдельно на место с пассивным давлением.
4. Свето-отверждайте каждый винир 3-5 секунд, начально прикрепив облицовки на место.
5. Удалите избыток цемента.
6. Свето-отверждайте каждый винир в течении 40 секунд с лингвальной и 40 секунд с губной поверхности.

Противопоказания:

- Не используйте ALL-BOND UNIVERSAL* у пациентов, имеющих историю серьезных аллергических реакций к метакриловым смолам.

Предупреждения:

- ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3* и BIS-SILANE™* чрезвычайно воспламеняемы. Плавиковая кислота очень активна и химически агрессивна. Не используйте этот продукт, если вы не прочли тщательно и поняли инструкцию к PORCELAIN ETCHANT* (9.5% HF). Избегайте попадания брызг в глаза. Если материал входит в контакт с глазами, промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. Фосфорная кислота в протравке является сильным раздражителем глаз и кожи.

Если протравка остается в контакте с кожей или слизистой оболочкой это может привести к их поражению. Если протравка случайно попала в глаз, промойте его большим количеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу. В случае контакта с другими тканями, сразу же сполосните их большим количеством воды в течение нескольких минут. При применении зубного адгезива, попадание слюны нарушит связку с дентином и может привести к уменьшению долговечности реставрации. Резиновая заслонка рекомендуется для всех прямых реставраций и других показаниях, где заражение слюной может быть возможно.

Внимание:

- Перекрестное загрязнение: Продукт может содержать компоненты, предназначенные для одноразового употребления. Избавьтесь от использованных принадлежностей. Не очищайте их, не дезинфицируйте и не используйте заново.

Предостережения:

Перекрестное заражение: Продукт может содержать элементы, предназначенные для одноразового использования. Избавьтесь от использованных или загрязненных компонентов. Не очищайте их, не дезинфицируйте или используйте вновь.

Предосторожности:

- Используйте ALL-BOND UNIVERSAL или ALL-BOND 3 сразу же после помещения его в смесительную чашечку. Длительное содержание на воздухе может привести к испарению растворителя и сгущению адгезива.
- Избегать контакта с кожей. Неполимеризованная (метил)акрилатная смола может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.
- Исходящий кончик светового проводника полимеризационной лампы следует располагать как можно ближе и вертикально к поверхности смолы. Если свето-отверждению должна подвергаться большая поверхность, рекомендуется разделить ее на секторы и свето-отверждать каждый сектор по отдельности.
- Если на структуре зуба использовался материал, содержащий ZOE (цинк оксид эвгенол) в течение предыдущих 2-3 недель, адекватно очистьте зубную поверхность абразивом прежде, чем использовать адгезиве.
- Неадекватная просушка адгезива воздухом не даст возможности полностью испарить растворитель и может привести к снижению силы связки и послеоперационной чувствительности.
- Держите UNI-ETCH®* вне прямого воздействия солнечных лучей.
- Низкая световая интенсивность способствует плохой адгезии.
- Чрезмерное скопление адгезива может препятствовать посадке окончательной реставрации.

Choice 2 Starter Kit with All-Bond Universal C-39010K




CHOICE 2 Starter Kit with ALL-BOND 3: C-3900K
цемент Choice 2 Veneer Cement, 5шпр., протравка Porcelain
Ethant 9,5% , 1 шпр., протравка Uni-Etch W/BAC, 1 шпр.,
адгезив All-Bond 3 Part A and B, 2 бут., 2-х компонентный
фарф. праймер Bis-Silane Part A and B, 2 бут., смола для
бондинга Porcelain Bonding Resin, 1 бут., кюветы для заме-
шивания - 15шт., канюли 40шт, аппликаторы-25шт.

Choice 2 Veneer Cement - A1	C-411A1P
Choice 2 Veneer Cement - A2	C-411A2P
Choice 2 Veneer Cement - A3	C-411A3P
Choice 2 Veneer Cement - B1	C-411B1P
Choice 2 Veneer Cement - B3	C-411B3P
Choice 2 Veneer Cement - C2	C-411C2P

Choice 2 Veneer Cement - D2	C-411D2P
Choice 2 Veneer Cement - Translucent	C-411TRP
Choice 2 Veneer Cement - Universal Opaque	C-411OPP
Choice 2 Veneer Cement - Milky Opaque	C-411MOP
Choice 2 Veneer Cement - Milky Bright	C-411MBP
Choice 2 Try-In Paste - A1	C-412A1P
Choice 2 Try-In Paste - A2	C-412A2P
Choice 2 Try-In Paste - A3	C-412A3P
Choice 2 Try-In Paste - B1	C-412B1P
Choice 2 Try-In Paste - B3	C-412B3P
Choice 2 Try-In Paste - C2	C-412C2P
Choice 2 Try-In Paste - D2	C-412D2P
Choice 2 Try-In Paste - Translucent	C-412TRP
Choice 2 Try-In Paste - Universal Opaque	C-412OPP
Choice 2 Try-In Paste - Milky Opaque	C-412MOP
Choice 2 Try-In Paste - Milky Bright	C-412MBP

ХРАНЕНИЕ: 20°C - 25°C

 BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.
 1-847-534-6000
 www.bisco.com

 ООО «Денко-Украина»
бул.Т.Шевченко,1 оф.8
Киев, 01004, Украина
 (067) 506-51-65
 www.denco.com.ua