

CHOICE 2

CHOICE 2 - світлотверднучий цемент для фіксації вінірів, що має високу стабільність кольору, високою міцністю на стиснення, створений спеціально для фіксації керамічних і композитних вінірів.

CHOICE 2 TRY-IN PASTE - розчинні пробні пасти, використовуються для точного підбору кольору цементу, який буде використаний для фіксації вініра.

Показання до застосування:

- Цементування порцелянових, дисилікатно-літієвих, композитних або цирконієвих вінірів

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

БОНДИНГ ВІНІРІВ:

Підготовка до реставрації та примірка:

A. ПОРЦЕЛЯНОВІ ВІНІРИ АБО ВІНІРИ З ДИСИЛІКАТУ ЛІТІЮ

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що порцеляновий вінір був належним чином протравлений або протравте вінір за допомогою плавиковою кислотою відповідно до інструкцій виробника за допомогою плавикової кислоти (наприклад, 9,5% PORCELAIN ETCHANT).

1. Нанесіть 1-2 шари силану на інтаглію реставрації (при використанні BIS-SILANE, змішайте частини А і В у співвідношенні 1:1) і залиште щонайменше на 30 секунд. Висушіть шприцом з теплим повітрям. (ПРИМІТКА: Поверхня поверхня заґрунтованої порцеляни буде виглядати однаково до і після силанізації).
2. Очистіть препарування зуба. Прополощіть і висушіть.
3. Примірте реставрацію з силановим покриттям на препарування для правильного прилягання. Нанесіть бажаний відтінок TRY-IN PASTE CHOICE 2 на вініри та акуратно встановіть препарування (ПРИМІТКА: TRY-IN PASTE не застигає і буде відповідати відповідний цемент для фіксації).
4. Коли бажаний відтінок CHOICE 2 визначено, зніміть реставрацію, і промийте водою і препарування, і реставрацію. Вініри слід ретельно промити водою з пульверизатора або за допомогою миючого засобу (напр. ZirClean®).
5. Приступайте до цементування.

B. КОМПОЗИТНІ ВІНІРИ

1. Очистіть препарування зуба розчином пемзи, прополощіть і висушіть.
2. Приміряйте композитні вініри на зуби для правильного прилягання. Нанесіть бажаний відтінок пасти CHOICE 2 TRY-IN PASTE на вініри та акуратно встановіть їх на зуби.
ПРИМІТКА: TRY-IN PASTE не застигає і буде відповідати відповідному цементу для фіксації.
3. Коли бажаний відтінок визначено, зніміть вініри і промийте зуб і вінір водою. Вінір повинен бути ретельно промити водою (або, в ідеалі, очистити ультразвуком у дистильованій воді або етанолом/ізопропіловим спиртом протягом 2-3 хвилин, а потім висушити).
4. Злегка обробіть внутрішню поверхню вініра піскоструминним апаратом протягом 1-2 секунд. Промийте і висушіть.
5. Приступайте до цементування.

C. ЦИРКОНІЄВІ ВІНІРИ

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що вінір був належним чином оброблений піскоструминним апаратом або обробіть внутрішню поверхню вініра відповідно до інструкцій виробника.

1. Нанесіть пензликом 1-2 шари цирконієвого праймера (наприклад, Z-PRIME Plus™) на інтаглію реставрації і залиште на 30 секунд. Просушіть на повітрі. (ПРИМІТКА: Поверхня цирконію буде виглядати однаково до і після нанесення праймера).
2. Очистіть препарування зуба. Прополощіть і висушіть.

3. Приміряйте оброблені праймером реставрації на зуби для правильного прилягання. Нанесіть бажаний відтінок TRY-IN PASTE CHOICE 2 на вініри та акуратно (ПРИМІТКА: TRY-IN PASTE не застигає і буде відповідати відповідний цемент для фіксації).
4. Коли бажаний відтінок ВИБОРУ 2 визначено, зніміть реставрацію і промийте водою як препарування, так і реставрацію.
ПРИМІТКА: Якщо поверхня не була попередньо оброблена цирконієвим праймером, знезаразьте поверхню засобом для чищення (наприклад, ZirClean®). Промити водою з розпилювача і висушіть на повітрі без вмісту масел. Потім перейдіть до кроку 1.
5. Приступайте до цементування.

ПІДГОТОВКА ЗУБІВ:

1. Підготовлені зуби почистити. Прополоскати і висушити.
2. Ізолювати препаровані зуби.
3. Протравіть емаль і дентин фосфорною кислотою (наприклад, Uni-Etch® 32 фосфорною кислотою) протягом 15 секунд. Ретельно промийте і видаліть надлишок води, але не витирайте насухо; препарована поверхня повинна бути помітно вологою.
4. Нанесіть адгезив відповідно до інструкцій виробника:
ALL-BOND UNIVERSAL: Нанесіть два окремих шари ALL-BOND UNIVERSAL, обробляючи препарування мікросіточкою протягом 10-15 секунд на кожен шар. Не полімеризуйте світлом між шарами. Випарити надлишок розчинника шляхом ретельної сушки на повітрі за допомогою повітряного шприца протягом щонайменше 10 секунд; не повинно бути видимого руху клею. Поверхня повинна мати рівномірний глянцевиий в іншому випадку нанесіть додатковий шар ALL-BOND UNIVERSAL і просушіть на повітрі. Полімеризація світлом протягом 10 секунд
5. Видаліть прокладочні матеріали або майларові смужки.
ALL-BOND 3: Змішайте частини А і В у співвідношенні 1:1 і нанесіть на заготовку 1-2 послідовних шари. Обережно, але ретельно висушіть на повітрі, щоб випарувався розчинник. Поверхня повинна виглядати блискучою; в іншому випадку нанесіть додатковий шар ALL-BOND 3 і висушіть на повітрі. Полімеризуйте світлом протягом 10 секунд.

ЦЕМЕНТУВАННЯ:

1. За бажанням, для порцелянових вінірів та вінірів з дисилікату літію нанесіть дуже тонкий шар смоли, що не містить HEMA, наприклад, PORCELAIN BONDING RESIN*, на внутрішню поверхню вініра і НЕ СУШИТИ СВІТЛОМ.
2. Нанесіть велику кількість обраного відтінку цементу на внутрішню поверхню вініра.
3. Встановіть вінір та акуратно перемістіть його на місце.
4. Зафіксуйте вініри світлом протягом 3-5 секунд, щоб закріпити їх на місці.
5. Видаліть надлишки цементу.
6. Полімеризуйте кожен вінір протягом 40 секунд з лінгвальної сторони і 40 секунд з з боку обличчя.

Важливо:

- Оскільки кераміка та порцеляна дуже різняться, важливо проконсультуватися з виробником кераміки/порцеляни або у вашій лабораторії для отримання інструкцій щодо належної перед використанням CHOICE 2 необхідно проконсультуватися з виробником кераміки/фарфору для отримання інструкцій щодо належної обробки поверхні та правильного препарування.
- Випромінюючий наконечник стоматологічної полімеризаційної лампи слід тримати якомога ближче і вертикальніше якомога ближче і вертикальніше до поверхні смоли.
- Якщо світловому затвердінню підлягає велика поверхня смоли, то бажано розділити ділянку на декілька частин і полімеризувати кожен частину кожен ділянку окремо.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігайте при кімнатній температурі (20-25°C).

ТОВ «ДЕНКО ПРО»
(067)-506-51-65
www.denco.com.ua