

CORE-FLO™ DC

Двокомпонентний текучий композит для формування кукси

CORE-FLO™ DC - це текучий, двоетапно полімеризований (dual-cured), рентгеноконтрастний композит для формування кукси.

CORE-FLO DC спеціально розроблений для фіксації штифтів і одночасного формування кукси в одному простому етапі. Також CORE-FLO DC є ідеальним матеріалом для заміщення дентину.

Постачається в автоматичному двошприцевому картриджі та використовується з диспенсером.

CORE-FLO DC призначений для використання з адгезивами, сумісними з матеріалами подвійного затвердіння, такими як адгезиви BISCO.

Показання до застосування:

1. Матеріал для формування кукси зуба
2. Фіксація штифтів або пінів
3. Матеріал для заміщення дентину

Технічна інформація:

При кімнатній температурі (20°C / 68°F – 25°C / 77°F):

Час роботи: мінімум 2 хвилини

Час затвердіння: максимум 7 хвилин

Час роботи та час затвердіння можуть змінюватися залежно від умов зберігання, температури, вологості тощо.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

ПРОЦЕДУРА ЗМІШУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУКСИ:

1. Вставте шприц у диспенсер Dual-Syringe та зніміть ковпачок або змішувальний наконечник з двошприцевого картриджа.
2. Видавіть невелику кількість матеріалу на змішувальну пластину, щоб усунути можливі порожнини в кожній камері шприца.
3. Приєднайте змішувальний наконечник до шприца, сумістивши ключ і паз. Потім поверніть коричневий фіксатор за годинниковою стрілкою.
4. Видавіть необхідну кількість матеріалу, застосовуючи рівномірний і помірний тиск. (Див. розділ "ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ" для інформації про час роботи та затвердіння.)

1. ФОРМУВАННЯ КУКСИ З ВИКОРИСТАННЯМ CORE-FLO™ DC

- 1.1 Ізолюйте зуб.
- 1.2 Нанесіть адгезив згідно з інструкцією виробника; рекомендується використовувати будь-який адгезив BISCO.
- 1.3 Дотримуйтесь ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕНСERA DUAL-SYRINGE для підготовки шприца до видавлювання CORE-FLO DC.
- 1.4 При використанні матричної стрічки:
Обгорніть підготовлений зуб матричною стрічкою. Розмістіть кінчик внутрішньоротової насадки безпосередньо на препаровану поверхню та видавіть CORE-FLO DC. Засвітіть лампою протягом 40 секунд.
- 1.5 При використанні форми для кукси:
Вставте змішувальний наконечник безпосередньо у форму для кукси та видавіть CORE-FLO DC. Розмістіть заповнену форму на підготовлений зуб, утримуйте її на місці та засвітіть лампою протягом 40 секунд.
- 1.6 Проведіть препарування та остаточну обробку кукси у звичний спосіб.

2. ТЕХНІКА ФІКСАЦІЇ ШТИФТА ТА ФОРМУВАННЯ КУКСИ З ВИКОРИСТАННЯМ CORE-FLO™ DC

1. Ізолюйте зуб і підготуйте його відповідно до інструкцій виробника штифта.
2. Нанесіть адгезив згідно з інструкцією виробника; рекомендується використовувати будь-який адгезив BISCO.
3. Перед полімеризацією промокніть канал паперовими штифтами до повного висушування, потім обережно просушіть адгезив повітрям для випаровування розчинника. Примітка: етап з паперовими штифтами важливий для видалення надлишків адгезиву, щоб не заважати повному посадженню штифта.
4. Покрийте поверхню штифта адгезивом згідно з інструкцією виробника — це покращить змочуваність штифта.

5. Дотримуйтесь ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕНСERA DUAL-SYRINGE для підготовки шприца до видавлювання CORE-FLO DC.
6. За допомогою наконечника для кореневих каналів введіть CORE-FLO DC у канал, починаючи з апікальної частини. Повільно витягуйте наконечник, залишаючи його в цементі, щоб мінімізувати утворення порожнин.
7. Покрийте апікальний кінець штифта CORE-FLO DC. Вставте штифт у канал і утримуйте помірний тиск протягом 20–30 секунд після посадки.
8. Продовжуйте видавлювати CORE-FLO DC навколо штифта та формуйте куксу до бажаної висоти та форми.
9. Видаліть надлишки матеріалу та засвітіть лампою протягом 40 секунд, розмістивши світловий наконечник якомога ближче до штифта та кукси.
10. Проведіть препарування та остаточну обробку кукси у звичний спосіб.

3. МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ДЕНТИНУ

1. Ізолюйте зуб і проведіть консервативне препарування. Промийте та висушіть.
2. Нанесіть адгезив згідно з інструкцією виробника; рекомендується використовувати будь-який адгезив BISCO.
3. Дотримуйтесь ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕНСERA DUAL-SYRINGE для підготовки шприца до видавлювання CORE-FLO DC.
4. Видавіть CORE-FLO DC лише до рівня з'єднання дентину з емаллю.
5. Засвітіть CORE-FLO DC протягом 10 секунд. Потім щільно вносьте світлотверднучий композит пошарово, поки порожнина не буде повністю заповнена. Засвітіть згідно з інструкцією виробника.
6. Перевірте оклюзію та виконайте фінішну обробку й полірування.

Протипоказання: Пацієнти, які мають історію важких алергічних реакцій на метакрилатні смоли.

Попередження: Виріб може містити елементи, призначені лише для одноразового використання. Використані або забруднені насадки слід утилізувати. Не очищуйте, не дезінфікуйте та не використовуйте повторно. Рекомендується використовувати стандартні гігієнічні захисні покриття для запобігання забрудненню шприців під час лікування. У разі забруднення шприца його слід утилізувати. Не очищуйте та не дезінфікуйте.

Гігієна: Щоб уникнути полімеризації або закупки, змішувальний наконечник на двошприцевому картриджі слід залишати на місці до наступного використання. Рекомендується використовувати стандартні гігієнічні захисні покриття для запобігання забрудненню шприців під час лікування. Якщо наконечник використовувався в порожнині рота, перед зберіганням протріть його дезінфікуючим засобом.

Запобіжні заходи: Уникайте контакту зі шкірою: неполімеризовані (мет)акрилатні смоли можуть викликати сенсibilізацію шкіри у чутливих осіб. У разі контакту промийте шкіру водою з милом.

Щоб уникнути полімеризації або закупки, наконечник для змішування на двошприцевому картриджі слід залишати на місці до наступного використання. Якщо наконечник використовувався в порожнині рота, перед зберіганням протріть його дезінфікуючим засобом.

Дотримуйтесь інструкцій виробника. На відміну від адгезивів BISCO, не всі однокомпонентні системи тотального протравлювання або самоетч-системи забезпечують адгезію до матеріалів самотвердіння або подвійного твердіння. Ізолюйте сформовану куксу перед зняттям відбитків або виготовленням тимчасових коронок/мостів (може бути достатньо ретельно зволожити її), щоб уникнути небажаного з'єднання з цими матеріалами.

Ознайомтеся з ІНСТРУКЦІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕНСERA DUAL-SYRINGE для правильного використання, поводження та догляду.

Якщо матеріал зберігався в холодильнику, перед використанням дайте йому нагрітися до кімнатної температури.

Пацієнт і стоматологічний персонал повинні використовувати захисні окуляри.

Перевіряйте етикетки окремих компонентів на наявність терміну придатності..

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати при кімнатній температурі (20°C - 25°C).

ТОВ "ДЕНКО ПРО"

(067)-506-51-65

www.denco.com.ua