

DUO-LINK UNIVERSAL

DUO-LINK UNIVERSAL - це фіксуючий цемент подвійного твердіння, спеціально розроблений для цементування BCIX непрямих реставрацій. Доступний у двох кольорах естетичних відтінках: Універсальний та Молочно-білий. Цемент DUO-LINK забезпечує всі бажані властивості для універсальної цементації: висока рентгеноконтрастність, висока механічну міцність, високу міцність бондингу, малу товщину плівки та легке очищення. DUO-LINK UNIVERSAL призначений для використання з адгезивами, розробленими для сумісності з усіма стоматологічними матеріалами, включаючи всі адгезиви BISCO.

Показання до застосування:

- Всі непрямі реставрації (тобто коронки, незнімні протези (мостовидні протези), вкладки, накладки виготовлені з металокомпозиту, порцеляни, кераміки, цирконію, оксиду алюмінію та CAD/CAM реставрації)
- Всі ендодонтичні штифти (тобто фіброві, композитні та металеві/цирконієві)
- Всі реставрації на цементних імплантатах (тобто гвинти та коронки)
- Вініри (композитні, суцільнокерамічні та цирконієві)

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

А. Підготовка зуба

1. Видалити тимчасову реставрацію та ретельно очистити підготовку.
2. Нанести адгезив відповідно до інструкцій виробника.

УВАГА: Всі адгезиви BISCO розроблені для оптимальної зчепленості, коли використовуються разом із цементом DUO-LINK UNIVERSAL від BISCO.

В. Препарування реставрації

Підготовка склокераміки/порцеляни (на основі діоксиду кремнію) або літій-дисилікатних/силікатних реставрацій:

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що порцелянова реставрація була належним чином протравлена або протравить реставрацію плавиковою кислотою (наприклад, 9.5% PORCELAIN ETCHANT) відповідно до інструкцій виробника.

1. Нанесіть 1 шар силану (наприклад, Porcelain Primer™, Bis-Silane™), рівномірно змочуючи реставрації, і залиште принаймні на 30 секунд. Висушіть шприцом з теплим повітрям.
2. Очистити препарування зуба. Прополощіть і висушіть.
3. Приміряйте реставрацію, оброблену силаном, на препарування для правильного прилягання.
4. Промийте водою з пульверизатора та висушіть на повітрі або використовуйте засіб для чищення (напр. ZirClean®).
5. Приступайте до цементування.

Ґрунтування металевих, цирконієвих, алюмооксидних, композитних та пост-реставрацій:

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що реставрація була належним чином оброблена піскоструминним методом

1. Нанесіть пензликком 1-2 шари цирконієвого праймера (наприклад, Z-PRIME Plus™) всередині реставрації. Зачекайте 30 секунд і висушіть на повітрі.

ПРИМІТКА: Поверхня заґрунтованого цирконію буде виглядати однаково до і після нанесення праймера.

2. Очистити препарування зуба. Промийте і висушіть.
3. Примірте оброблену праймером реставрацію на препарування для правильного прилягання.
4. Ретельно промийте водою і висушіть повітрям, що не містить масел.

ПРИМІТКА: Якщо поверхня не була попередньо оброблена ґрунтовкою, знезаразьте поверхню засобом для чищення (наприклад, ZirClean®). Промийте водою і сушити повітрям без масла. Потім виконати крок 1.

5. Приступайте до цементування.

С. Цементування

Процедури змішування цементу:

1. Зніміть ковпачок з подвійного шприца.
2. Видавіть невелику кількість матеріалу на змішувальну подушечку, щоб усунути будь-які порожнечі в кожній камері подвійного шприца.
3. Приєднайте змішувальну насадку до подвійного шприца, сумістивши шпонку та паз. Потім поверніть коричневий запірний механізм за годинниковою стрілкою.
4. Натискання на поршень призведе до змішування та дозування DUO-LINK UNIVERSAL. (Див. розділ "ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ" для отримання інформації про час роботи та час застигання інформацію про роботу та встановлення часу).

Процедури цементування:

Для цементування вкладок, накладок, коронок і мостовидних протезів:

1. Нанесіть Duo-Link Universal на внутрішню поверхню реставрації.
2. Повністю зафіксуйте реставрацію.
3. Зафіксуйте краї протягом 2-3 секунд і видаліть надлишки цементу.
Додатково: після видалення надлишків цементу кожна поверхня реставрації кожна поверхня реставрації може полімеризуватися до 40 секунд.

Для цементування штифта:

1. Прикріпіть наконечник для змішування кореневих каналів
2. Введіть Duo-Link Universal в канал.
3. Обережно вставте штифт у канал і міцно притискайте його протягом 20-30 секунд секунд.

Технічна інформація:

- Час роботи: мінімум 2 хвилини при 22°C
- Час схоплювання: максимум 3 хвилини 30 секунд при 37°C
- Час роботи та час схоплювання може змінюватися залежно від умов зберігання, температури, вологості тощо.
- Надлишок матеріалу полімеризується світлом за допомогою світлодіода полімеризаційним світлом протягом 2-3 секунд на кожную чверть поверхні (мезіо-фаціальну, дистофаціальну, дистолінгвальну, мезіо-лінгвальну), на відстані приблизно 0-10 мм.

Важливо:

- Продукт може містити елементи, призначені для одноразового використання. Утилізуйте використані або забруднені насадки. Не чистити, не дезінфікувати і не використовувати повторно.
- Уникати контакту зі шкірою; неполімеризовані (мет)акрилатні смоли можуть викликати сенсibilізацію шкіри у сприйнятливих осіб. У разі потрапляння на шкіру, промити шкіру водою з милом.
- Час роботи та затвердіння прискорюється в теплому внутрішньоротовому середовищі.
- Зверніться до інструкцій виробника. На відміну від адгезивів BISCO, не всі бондингові системи хімічно сумісні з матеріалами само- або подвійного матеріалами само- або подвійного затвердіння.
- Для тонких вінірів рекомендується використовувати CHOICE™* 2 для цементування.
- Щоб запобігти полімеризації або засміченню, подвійну шприц-міксерну насадку слід залишати на місці до наступного застосування.
- Оскільки різні види кераміки потребують різної обробки поверхні (наприклад, травлення або стирання частинок), зверніться до лабораторії або виробника для отримання інструкцій з обробки внутрішньої поверхні.
- Не використовуйте перекис водню, ЕДТА або матеріали, що містять евгенол перед процедурою склеювання, оскільки ці матеріали можуть перешкоджати склеюванню.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігайте при кімнатній температурі (20-25°C).

ТОВ «ДЕНКО ПРО»
(067)-506-51-65
www.denco.com.ua