


FORTIFY

композитный герметик

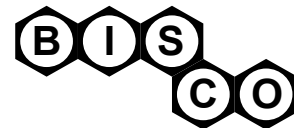

FORTIFY - светоотверждаемый, маловязкий, ненаполненный смолистый материал, который используется в качестве закрепителя поверхности и который уменьшает, как доказано, износ композитных материалов для восстановления поверхности зуба на 45% в течение пяти лет.

Обработка и шлифовка композитных материалов для внутренней стороны зубов с помощью вращающихся инструментов может привести к возникновению микротрещин и неровностей поверхности, что, в свою очередь, повышает износ композитного материала в первые шесть месяцев.

Поверхность композитного материала, закрепленная с помощью FORTIFY, не подвержена износу, а долговременная пограничная прочность значительно лучше.

FORTIFY эффективен для применения со всеми постериорными /антериорными композитными материалами (Bis-GMA или смолистая основа, содержащая urethane dimethacrylate) для усиления их износостойкости.

Принцип использования FORTIFY - это проникновение и герметизация поверхности:

1. Прямых Композитных Реставраций
2. Непрямых Композитных Реставраций
3. Временных реставраций
4. Реставраций из Амальгамы

Для новых реставраций: после корректировки, отделки и полировка окончательной реставрации, ополаскивание зуба и восстановление с помощью обильное количество воды для удаления всех мусора. ИЛИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для новых пломб:

1. Сразу после окончательной подшлифовки, притирки прикуса и подработки композитной пломбы, промойте зуб и пломбу большим количеством воды, чтобы удалить все посторонние включения.
2. Протравите поверхность композитной пломбы и поверхность эмали в области 1-2 мм от границы между зубом и композитным материалом в течение 15 секунд. Смойте с зуба препарат для травления и тщательно промойте пломбу.
3. Просушите зуб и поверхность пломбы, используя воздух, не содержащий влагу или масло.
4. Выдавите небольшое количество материала FORTIFY на смеситель. С помощью одноразовой кисточки нанесите тонкий слой на протравленную поверхность эмали и композитного материала. Слабая струя воздуха помогает получить ровное распределение материала по поверхности.
5. Обработайте поверхность материала светом в течение 10 секунд. Проверьте прикус.

Для ранее установленных пломб:

удалите протеиновый слой, пятна и лишний материал на поверхности с помощью водной струи, содержащей измельченную пемзу.

Далее как и при установке новой пломбы.

▲ **FORTIFY также рекомендуется для применения на пломбе из амальгамы в области стыка эмали и амальгамы. В этом случае процедура такая же как и выше.**




ХРАНЕНИЕ: Храните при комнатной температуре (20°C - 25°C).

Каталожный номер:

Bottle Fortify (5ml)

G-9301F

 BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.
 1-847-534-6000
 www.bisco.com

 ООО «Денко-Украина»
бул.Т.Шевченко,1 оф.8
Киев, 01004, Украина
 (067) 506-51-65
 www.denco.com.ua



UA.TR.118.008.17