


# MODELING RESIN

*моделировочная и смачивающая смола для работы с композитом*

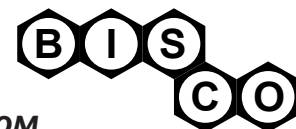

Светоотверждаемая, жидкотекучая, микрофильная (30% наполнителя от веса) смола, используемая для моделировки композита.

Связующие свойства многих композитов заставляют их прилипать и тянутся за инструментом.

Именно для того, чтобы избежать этого неприятного эффекта была разработана моделировочная смола, которая кроме этого делает нанесение и моделировку композита проще и удобнее.

Просто смочите инструмент в моделировочной смоле и после этого начинайте работу с материалом.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

1. Удалите защитный колпачок и закрепите канюлю на шприце.
2. Выдавите одну, две капельки моделировочной смолы на листик для замешивания.
3. Затем выдавите необходимое количество композитного материала, которым вы будете восстанавливать зуб, на еще один листик для замешивания.
4. Обмокните инструмент, которым вы будете работать, в моделировочной смоле.
5. Наносите и моделируйте композит при помощи смоченного в смоле инструмента.
6. Отверждайте светом. Моделировочная смола требует отверждения светом в течение 10 секунд, но вам необходимо отверждать композит светом, то время, которое рекомендует производитель композита, чтобы убедиться в правильном и полноценном отверждении материала.
7. Следующие порции незаполимеризованного композита будут прилипать к «засвеченной» моделировочной смоле.

### **Предостережения:**

- Неполимеризованные смолы могут вызвать раздражение кожного покрова у людей с повышенной чувствительностью кожи.
- При попадании на кожу — незамедлительно промойте водой с мылом.

**ХРАНЕНИЕ:** *Храните при комнатной температуре (22°C).*

### **Каталожный номер:**

**Modeling Resin (2шпр. по 1.5г)**

**G-9316P**



BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.  
1-847-534-6000  
www.bisco.com



ООО «Денко-Украина»  
бул.Т.Шевченко,1 оф.8  
Киев, 01004, Украина  
(067) 506-51-65  
www.denco.com.ua

