

MODELING RESIN

МОДЕЛЮВАЛЬНА СМОЛА* - це світлотвердіюча мікронаповнена смола з низькою в'язкістю, яка використовується як моделювальна смола для композитного моделювання.

Властивості композиту самі по собі сприяють його прилипанню до інструменту.

Щоб подолати цей неприємний ефект липкості, була розроблена моделювальна смола, яка допомагає розміщенню та формуванню композитів.

За допомогою зволоження інструменту, моделювальну смолу можна використовувати для розміщення та моделювання всіх прямих композитних реставрацій.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

1. Відкрийте ковпачок і надійно закріпіть накінецьник на шприці.
2. Вистисніть одну-дві краплі моделювальної смоли в чисту кришечку або на палетку для змішування.
3. Після нанесення початкової частини композиту на підготовлене місце, занурте інструмент для композиту в моделювальну смолу.
4. З моделювальною смолою на інструменті скульптуйте свою реставрацію і маніпулюйте композитом, щоб досягти бажаної форми.
5. Полімеризуйте. Хоча моделювальна смола потребує полімеризації протягом 10 секунд, слід дотримуватись рекомендацій виробника композиту щодо часу полімеризації.
6. Наступні порції композиту прилипатимуть до заполімеризованої моделювальної смоли.

Попередження:

У разі випадкового потрапляння в очі слід негайно промити великою кількістю води та звернутися за

медичною допомогою. У разі контакту зі шкірою слід негайно промити великою кількістю води протягом кількох хвилин.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігайте при кімнатній температурі (20-25°C).

ТОВ «ДЕНКО ПРО»

067-506-51-65

www.denco.com.ua