


ОРАQUER

маскировщик для металла

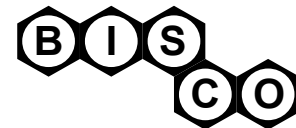

Ораquer является специальным красящим агентом, используемым для маскировки тёмных оттенков металлических (недрагоценных, полудрагоценных и драгоценных) каркасов стоматологических протезов. В то время как маскировка металлического каркаса необходима с эстетической точки зрения, нелегко заблокировать тёмный металлический оттенок, при использовании различных оттенков реставрационного материала (композиционного или фарфора). Это требует тщательного баланса между мутностью, оттенком и интенсивностью цвета красящих агентов. Ораquer успешно воплощает этот баланс.

Ораquer - двухкомпонентный агент с двойной отверждаемостью.

Точный оттенок замутнителя достигается смешением равных порций Катализатора и Базы.

Чтобы улучшить размещение и предотвратить стекание, смешанный замутнитель может быть также отверждён светом предварительно без вреда для его полного химического схватывания.

Система замутнителя основана на Bis-GMA и совместима с множеством композиционных материалов для реставрационных работ. Ораquer - предназначен для использования с адгезивами 4-го или 5-го поколения.

Техническая информация:

1. Хранить при комнатной температуре: 22 ° C
2. Время работы: Минимум 30 сек.
3. Время схватывания: Максимум 2 мин. 45 сек.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Изолируйте область ремонта.
2. Удалите глазурь и скос (45 °) фарфора вокруг области, подлежащей ремонту (починке).
3. Нанесите BARRIER GEL на участки нуждающиеся в защите от попадания протравки.
4. На сухую поверхность фарфора нанесите протравку Porcelain Etchant 9.5% на 90 секунд.
5. Смойте обильным количеством воды и подсушите.
6. Протравленная поверхность должна выглядеть тусклой и морозной.
Примечание: В качестве альтернативы можете использовать пескоструйный аппарат или обработать грубым алмазным бором.
7. Нанесите 1 слой PORCELAIN PRIMER на поверхность протравленной керамики и дайте ему впитаться в течение 30 секунд. Подсушите.
8. Нанесите 1 слой Z-PRIME Plus на оголенный металл/цирконий/алюмину и подсушите в течение 3-5 секунд.
9. Перед нанесением хорошо встряхните флаконы с Базой и Катализатором. Выдавите по капле Катализатора (A) и Базы (B) в чашечку для перемешивания и смешайте кисточкой.
10. Нанесите тонкий слой на металлическую поверхность и подождите одну минуту для схватывания или полимеризуйте светом в течение 5 секунд.
11. На поверхности замутнителя сразу после окончания процесса отверждения может присутствовать воздухозащитный слой. Это нормально для материала. Комозитный материал может быть легко связан с этой поверхностью.
12. Нанесите тонкий слой PORCELAIN BONDING RESIN на место ремонта (починки).
Равномерно распределить по поверхности и полимеризуйте.
13. Нанесите слой желаемого композиционного материала и выполните окончательную обработку.



Важно:

Перемешанный замутнитель позволяет работать с ним около одной минуты при температуре 22 ° C.

ОРАQUER - 1 Bottle Universal Base (3ml) B-2122Q

ОРАQUER - 1 Bottle Catalyst (3ml) B-2112Q

 BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.
 1-847-534-6000
www.bisco.com

 ООО «Денко-Украина»
бул.Т.Шевченко,1 оф.8
Киев, 01004, Украина
 (067) 506-51-65
www.denco.com.ua