


# ORTHO BRACKET PASTE LC

## бондинг ортодонтических конструкций

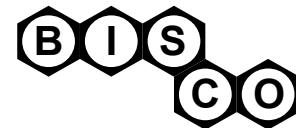

ORTHO BRACKET PASTE LC ортодонтическая паста светового отверждения для фиксации брекетов. Эта система сочетает в себе микромеханический связь с эмалью и химическую связь между ONE-STEP и ORTHO BRACKET PASTE LC создавая максимальную прочность склеивания с керамическими, металлическими, пластмассовыми брэкетами.

В дополнение к его прекрасным адгезивным свойствам, ORTHO BRACKET PASTE LC позволяет сразу размещать ортодонтическую конструкцию, после того, как паста была нанесена, сокращая время приема и повышая удовлетворенность пациентов.

### Показания к применению:

- Фиксация ортодонтических конструкций



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Очистите зубы профилактической пастой.
2. Промойте и просушите.
3. Нанесите ETCH-37™ \* прямо на поверхность эмали на 30 сек., (до 60 секунд для молочных зубов) ограничиваясь площадью расположения конструкции. Не втирайте протравку, чтобы избежать разрушения эмали. Не травите более 90 сек., это может уменьшить прочность бондинга.
4. Тщательно промойте каждый зуб в течении 5 сек и просушите. Обработанная поверхность должны выглядеть тусклой и морозно белой. Если нет, повторно протравите места по мере необходимости.
5. Держите One-Step под углом 45° и капните 1-2 капли в емкость для замешивания. Используя кисть, нанесите тонкий слой адгезива на протравленную эмаль.
6. Аккуратно просушите воздухом, чтобы выпарить растворитель.
7. Нанесите пасту на внутреннюю поверхность брекета.
8. Расположите конструкцию на зуб в нужное положение. Удалите излишки материала. Будьте осторожны, чтобы не сместить всю пасту из-под конструкции.
9. Расположите световод лампы максимально близко к конструкции и отверждайте светом в течение 30 секунд, следуя инструкциям ниже:
  - а) металлические брекеты - отверждайте светом в течение 20 секунд с стороны резца и 10 секунд с стороны десны
  - б) керамические или пластиковые - отверждайте светом в течение 30 сек. через ортодонтическую конструкцию с лицевой стороны.
10. После отверждения, можно размещать активную часть конструкции.

Ortho-One LC Starter Kit      F-63020P

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре (20°C-25°C)

 BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.  
 1-847-534-6000  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

 ООО «Денко-Украина»  
бул.Т.Шевченко,1 оф.8  
Киев, 01004, Украина  
 (067) 506-51-65  
[www.denco.com.ua](http://www.denco.com.ua)