

Porcelain Etchant 4%

протравка для порцеляни

Гель для травлення PORCELAIN ETCHANT покращує механічний зв'язок між керамікою та клеєм/цементом за рахунок збільшення площі поверхні кераміки. Результат схожий на піскоструминну обробку, але є більш контрольованим та ефективним.

Показання до застосування:

В основному 4% гель для травлення PORCELAIN ETCHANT використовується для травлення кераміки перед:

1. Цементациєю керамічних реставрацій.
2. Ремонт керамічних реставрацій.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Зніміть ковпачок зі шприца. Надійно закріпіть наконечник для дозування. Перевірте потік травлення перед нанесенням на реставрацію, включаючи внутрішньоротову.

1. ТРАВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ РЕСТАВРАЦІЙ ПЕРЕД ЦЕМЕНТАЦІЄЮ

1. Лікар та асистент повинні використовувати захисні окуляри та рукавички.
2. Якщо лабораторія ще не протравила реставрацію зуба, нанесіть гель для травлення PORCELAIN ETCHANT (4 % HF) на суху поверхню кераміки на 5–6 хвилин. При використанні травлення не допускайте його потрапляння на глянцевої поверхні кераміки, інакше ці поверхні втратять свій блиск.
3. Промийте великою кількістю води та висушіть під струменем повітря. Протравлена поверхня повинна виглядати матовою та білуватою (якщо кераміка має білий/меловий вигляд, очистіть її вологою мікрощіткою для видалення солей та дебрису, що утворилися в результаті травлення).
4. Нанесіть пензлем один-два тонких шари силану на протравлену внутрішню поверхню реставрації відповідно до інструкцій виробника. Висушіть поверхню під струменем повітря.
5. Приступайте до нанесення клею та цементациї відповідно до інструкцій виробника.

2. РЕМОНТ КЕРАМІЧНИХ РЕСТАВРАЦІЙ

1. Лікар та асистент повинні використовувати захисні окуляри та рукавички. Пацієнт повинен використовувати захисні окуляри.
2. Видаліть глазур і виконайте скіс (під кутом 45 градусів) кераміки навколо ремонтваної ділянки. (Видаліть весь старий композит, що залишився від попереднього ремонту.)
3. Ізолюйте область, що підлягає травленню, за допомогою коффердама. У місця, де травлення небажане, необхідно нанести BARRIER GEL * виробництва компанії BISCO.
4. Нанесіть гель для травлення PORCELAIN ETCHANT (4 % HF) на суху керамічну поверхню на 5–6 хвилин. Продовжуйте спостерігати за місцем травлення протягом усієї процедури. Видаліть залишки гелю для травлення PORCELAIN ETCHANT за допомогою слиновідсмоктувача, потім промийте великою кількістю води та висушіть під струменем повітря. Протравлена поверхня повинна виглядати матовою та білуватою (якщо кераміка має білий/меловий вигляд, очистіть її вологою мікрощіткою для видалення

солей та дебрису, що утворилися в результаті травлення, а потім промийте та просушіть).

5. Нанесіть один-два тонких шари силану пензлем на протравлену поверхню реставрації та залиште на 30 секунд. Висушіть за допомогою шприца для продування порожнини.
6. Нанесіть систему адгезиву відповідно до інструкцій виробника. Завершіть відновлення з використанням композиту та фінішної обробки/полірування. ПРИМІТКА: Для ремонту з відкритим металом, оксидом алюмінію, діоксидом цирконію або композитом див. інструкції до INTRAORAL REPAIR KIT* виробництва компанії BISCO.

Увага:

• Не використовуйте цей продукт, доки не прочитаете і не засвоїте цю інструкцію. • Фтороводнева кислота є дуже потужною та агресивною хімічною речовиною. • Це сильний подразник для очей і тканин. У разі випадкового потраплення в очі промийте їх великою кількістю води протягом 15 хвилин і негайно зверніться за медичною допомогою. • Фтороводнева кислота також виділяє пари, які подразнюють дихальні шляхи. Хронічне вдихання парів небезпечно і може завдати шкоди. • Необхідно дотримуватися крайньої обережності, щоб захистити пацієнта, лікаря та асистента. • Пацієнт, лікар та асистент повинні використовувати захисні окуляри. • Лікар та асистент повинні використовувати захисні рукавички. • При внутрішньоротовому відновленні з використанням кераміки необхідно використовувати кофердам. • НЕ використовуйте гель для травлення PORCELAIN ETCHANT для травлення відкритих поверхонь емалі або дентину. • Якщо гель для травлення PORCELAIN ETCHANT залишиться на шкірі або слизовій оболонці протягом тривалого часу, це може призвести до пошкодження. При контакті з іншими тканинами негайно промийте великою кількістю води протягом декількох хвилин. • Перед тим, як використовувати гель для травлення інтраорально, перевірте, чи витікає він. Якщо відчувається опір, замініть наконечник і повторіть перевірку. Використовуйте тільки рекомендовані наконечники. • Не допускайте проковтування продукту. • Закрийте шприц наконечником Люера

Увага: Перехресне забруднення: • продукт може містити компоненти, призначені для одноразового використання. Утилізуйте використані або забруднені приналежності. Не намагайтеся їх очистити, дезінфікувати або повторно використовувати. • Рекомендується використовувати звичайне гігієнічне захисне покриття, щоб уникнути забруднення шприців під час лікування. Якщо шприц забруднений, викидайте його. Не намагайтеся очистити або дезінфікувати його

Міри застереження: • Не травіть реставрації, протравлені в лабораторії, повторно. Надмірне травлення кераміки може призвести до її ослаблення або погіршення міцності з'єднання. • Гель для травлення PORCELAIN ETCHANT надає мікроскопічну шорсткість керамічним і скляним поверхням. Таким чином, при використанні травлення не допускайте його потраплення на глянцевої поверхні кераміки, інакше ці поверхні втратять свій блиск.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігайте при кімнатній температурі (20°C - 25°C).

ТОВ «ДЕНКО ПРО»
067-506-51-65
www.denco.com.ua