


TheraCal LC

кальцевая выстилка модифицированная смолой для защиты пульпы

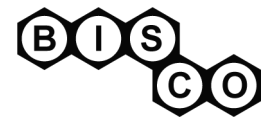

TheraCal LC предназначен для применения в качестве барьера и для защиты пульпы зуба. Свойства материала TheraCal LC позволяют использовать его в любых глубоких полостях.

Отверждение светом дает возможность врачу экономить время и продолжить восстановление зуба сразу после отверждения TheraCal LC светом. Материал легко и удобно наносить и контролировать на полости благодаря тиксотропным свойствам.

Уникальная гидрофильная смола, входящая в состав материала, создает стабильный и прочный защитный слой.

Показания к применению:

1. TheraCal LC предназначен для прямого покрытия пульпы зуба.

Может помещаться непосредственно на оголенные участки пульпы.

Он показан для покрытия пульпы, в том числе:

- После кариозного воздействия
- Механического воздействия
- Экспозиции из-за травмы

2. TheraCal LC предназначен для нанесения в качестве выстилки и герметика:

- Перед амальгамной реставрацией
- В реставрациях первого и второго класса
- Как материал основание
- Перед использованием цемента
- В качестве альтернативы гидроксида кальция
- В качестве альтернативы стеклоиономерных цементов / RMGI
- В качестве альтернативы герметизирующему лаку
- В качестве альтернативы фосфату цинка
- В качестве альтернативы IRM / ZOE (традиционным реставрационным материалам)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Защита открытой пульпы

1. Используйте коффердам. Подготовьте полость.
2. Удалите кровь с препаровки ватным тампоном смоченным стерильным физиологическим раствором.
3. Промокните препаровку стерильным ватным тампончиком, оставив ее слегка влажной.
4. Нанесите TheraCal LC непосредственно на пульпу слоем не более 1 мм толщиной. Необходимо нанести TheraCal LC на всю площадь оголения пульпы и не менее чем на 1 мм окружающего оголение плотного дентина. Полимеризуйте между слоями.
5. Полимеризуйте каждую порцию материала в течение 20 секунд.
6. Нанесите адгезив и композит для восстановления полости в соответствии с инструкциями производителя. Продолжайте восстановление зуба.

2. Использование в глубоких полостях (в качестве выстилки/герметика)

1. Используйте коффердам. Подготовьте полость. Оставьте препаровку слегка влажной.
2. Нанесите TheraCal LC непосредственно на все дно препаровки (на глубокий дентин) слоем не более 1 мм толщиной. Если наносите несколько слоев (порций) - полимеризуйте между слоями.
3. Полимеризуйте каждую порцию материала в течение 20 секунд.
4. Нанесите адгезив и композит для восстановления полости в соответствии с инструкциями производителя. Продолжайте восстановление зуба.

Предупреждения:

- TheraCal LC содержит полимеризуемые мономеры метилметакрилата. Избегайте длительного или многократного воздействия на кожу, мягкие ткани полости рта и глаз. Это может привести к раздражению и возможному повреждению роговицы, кожной сыпи, раздражению слизистой оболочки полости рта или другим аллергическим реакциям (аллергический контактный дерматит). Не принимать внутрь.
- TheraCal LC не рекомендуется для использования пациентам, которые имеют в анамнезе тяжелые аллергические реакции на смолы метакрилата.

Особые указания:

- Продукт содержит элементы, которые предназначены для одноразового использования. Утилизируйте компоненты, предназначенные для единократного использования.

Меры предосторожности:

- В силу состава TheraCal LC необходимо использовать только в ситуациях, где он может защищен от внутриротовой среды. Материал должен быть перекрыт другим материалом.
- Успех процедуры может зависеть от чистоты операции. -екомендуется использоватькоффердам.
- Кровотечение пульпы необходимо остановить до использования TheraCal LC. Если кровотечение не контролируется, необходимо рассмотреть вопрос о проведении эндодонтического лечения.
- Если толщина материала больше, чем 1 мм, желательно наносить и полимеризовать TheraCal LC небольшими порциями.
- TheraCal LC - материал светового отверждения. Продолжайте восстановление сразу же после полимеризации материала светом.
- Срок годности указан на каждом компоненте материала.

ХРАНЕНИЕ: (20°C - 25°C).



1 Syringe TheraCal LC (1g)

H-3301P

4 Syringes TheraCal LC (1g ea.)

H-33014P

 **BISCO, INC.**
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.
 1-847-534-6000
www.bisco.com

 **ООО «Денко-Украина»**
бул.Т.Шевченко,1 оф.8
Киев, 01004, Украина
 (067) 506-51-65
www.denco.com.ua