

TheraCal LC

TheraCal LC призначений для використання як бар'єр та захист пульпи зуба. Властивості матеріалу TheraCal LC дозволяють використовувати його в будь-яких глибоких порожнинах. Затвердіння світлом дозволяє лікарю заощаджувати час і продовжувати відновлення зуба відразу після відвердіння TheraCal LC світлом.

Матеріал легко і зручно наносити та контролювати на порожнині завдяки тіксотропним властивостям. Унікальна гідрофільна смола, що входить до складу матеріалу, створює стабільний та міцний захисний шар.

Показання до застосування:

1. TheraCal LC призначений для прямого покриття пульпи зуба.
Може розміщуватись безпосередньо на оголені ділянки пульпи.

Він показаний для покриття пульпи, включаючи:

- Після каріозного впливу
- Механічного впливу
- Експозиції через травму

2. TheraCal LC призначений для нанесення як вкладки та герметика:

- Перед амальгамною реставрацією
- В реставраціях I та II класу
- Як матеріал основа
- Перед використанням цементу
- Як альтернатива гідроксиду кальцію
- Як альтернатива склоіономерних цементів / RMGI
- Як альтернатива герметизуючому лаку
- Як альтернатива фосфату цинку
- Як альтернатива IRM / ZOE (традиційним реставраційним матеріалам)

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

I Захист відкритої пульпи

1. Використовуйте коффердам. Підготуйте порожнину рота.
2. Видаліть кров з препаровки ватним тампоном, змоченим стерильним фізіологічним розчином.
3. Промокніть препаровку стерильним ватним тампончиком, залишивши її трохи вологою. Нанесіть TheraCal LC безпосередньо на пульпу шаром не більше 1 мм товщиною. Необхідно нанести TheraCal LC на всю площу оголення пульпи та не менше ніж на 1 мм навколо оголення щільного дентину. Полімеризуйте між шарами.
4. Полімеризуйте кожну порцію матеріалу протягом 20 секунд.
5. Нанесіть адгезив та композит для відновлення порожнини відповідно до інструкцій виробника. Продовжуйте відновлення зуба.

II Використання в глибоких порожнинах (як вистилання/герметика)

1. Використовуйте коффердам. Підготуйте порожнину. Залиште препаровку злегка вологою.
2. Нанесіть TheraCal LC безпосередньо на все дно препарування (на глибокий дентин) шаром не більше 1 мм завтовшки. Якщо наносите кілька шарів (порцій) - полімеризуйте між шарами.
3. Полімеризуйте кожну порцію матеріалу протягом 20 секунд.
4. Наносьте адгезив і композит для відновлення порожнини відповідно до інструкцій виробника. Продовжуйте відновлення зуба.

Важливо:

- У разі випадкового потрапляння в очі слід негайно промити великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою. У разі контакту зі шкірою слід негайно промити великою кількістю води протягом кількох хвилин.
- TheraCal LC містить полімеризовані мономер метилметакрилату. Уникайте тривалого або повторного контакту зі шкірою, м'якими тканинами порожнини рота та очей. Це може призвести до подразнення та можливої пошкодження рогівки, шкірних висипок, роздратування слизової оболонки порожнини рота або інших алергічних реакцій (алергічний контактний дерматит). Не приймайте в середину.
- TheraCal LC не рекомендується для використання пацієнтам, у яких в анамнезі є важкі алергічні реакції на смоли метакрилату.
- TheraCal LC повинен використовуватися тільки в ситуаціях, де він може бути захищений внутрішньоротової середовищем через його склад. Матеріал повинен бути покритий іншим матеріалом.
- Успіх процедури може залежати від чистоти операції. Рекомендується використовувати кофердам.
- Кровотечу пульпи необхідно зупинити до використання TheraCal LC. Якщо кровотечу не можна контролювати, необхідно розглянути питання про проведення ендодонтичного лікування.
- Якщо товщина матеріалу більше 1 мм, бажано наносити і полімеризувати TheraCal LC невеликими порціями.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігайте при кімнатній температурі (20-25°C).

ТОВ «ДЕНКО ПРО»
(067)-506-51-65
www.denco.com.ua