

UNI-ETCH 32%

напівгелева протравка

UNI-ETCH 32% - напівгелева протравка Bisco містить фосфорну кислоту (H_3PO_4) та полімерний загусник і призначена для використання на емалі та дентині.

Ця протравка ефективно видаляє змазаний шар, протравлює та демінералізує емаль і дентин, забезпечуючи поверхню необхідною мікроретенцією для надійного з'єднання з адгезивом.

Спеціально розроблена (запатентована) напівгелева формула не залишає кремнієвих частинок.

Ці протравки можна використовувати як самостійно, так і в поєднанні з іншими препаратами.

Полімерний загусник надає матеріалу тиксотропних властивостей, що полегшує роботу з ним.

Протравка легко та швидко змивається, не залишаючи жодних слідів.

Опубліковані дослідження підтвердили, що протравки Bisco забезпечують вищу силу з'єднання з дентином (вологим або сухим) та емаллю..

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

ПРОЦЕДУРА ЗМІШУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУКСИ:

1. Ізолюйте зуб і підготуйте порожнину звичним способом. Повністю очистьте поверхню рідкою пемзою з водою.
2. Нанесіть протравку за допомогою наконечника EZ-DOZE, шприца з одноразовим наконечником або щітки з одноразовим наконечником. Протравлюйте протягом 15 секунд. Час протравлювання необхідно контролювати секундоміром — відлік починається з моменту нанесення препарату. Порада: спочатку нанесіть протравку на емаль, а потім на дентин, щоб збільшити час дії на емаль.
3. Ретельно промийте ділянку нанесення протягом щонайменше 5 секунд, повністю видаливши залишки протравки.
4. Для досягнення оптимального результату не пересушуйте емаль або дентин.

Попередження: Фосфорна кислота викликає сильне подразнення шкіри та очей. У разі потрапляння в очі — ретельно промийте їх водою та негайно зверніться за медичною допомогою.

У разі потрапляння матеріалу на шкіру — ретельно промийте місце контакту милом і водою.

При тривалому контакті протравки зі шкірою можливе ушкодження ділянки контакту.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати при кімнатній температурі (22°C).

ТОВ "ДЕНКО ПРО"

(067)-506-51-65

www.denco.com.ua